

Инструкция по применению средства для очищения слухового прохода



Держите голову вертикально и прямо, поместите насадку спрея перед входом в ушной канал и распылите в ушной канал спрей, нажав 1-2 раза.



Для еще большей эффективности массируйте ухо в течение нескольких секунд.



Держите голову под углом, оставьте раствор на некоторое время, затем протрите жидкость, содержащую грязь, чистой тканью, и вытрите ухо насухо.



После каждого использования снимите переднюю насадку распылительной головки, промойте теплой водой и высушите.

Применять средство можно по мере необходимости от 1 до 2 раз в день.