


Инструкция по использованию восковых беруш OHROPAX Classic

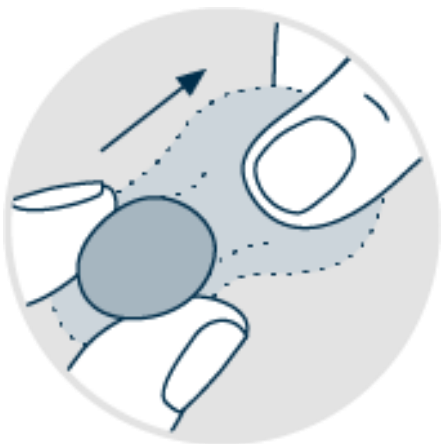

Перед использованием полностью удалите вату, обертывающую беруши, чистыми пальцами. При необходимости оторвите несколько кусочков, чтобы сделать беруши немного меньше. Не используйте повторно оторванные кусочки.



Слегка разомните беруши, придайте форму достаточно плотного шарика и плотно закройте слуховой канал, слегка надавливая. Не вставляйте глубоко.



Правильно



Неправильно



После использования обязательно удалите беруши из ушей с помощью пальцев. Слегка надавите на ушную раковину сзади, чтобы ослабить прилегание беруш. Не используйте твердые или острые предметы для удаления беруш из ушей.