

Инструкция по использованию силиконовых беруш



Сильно сожмите беруши несколько раз чистыми, сухими пальцами, и придайте им форму сплошного шарика. Он должен быть достаточно большим, чтобы полностью изолировать слуховой канал снаружи, не входя в слуховой канал. Убедитесь, что ваши руки и затычки для ушей сухие, в противном случае беруши не зафиксируются на месте и не закроют слуховой канал.



Не делайте берушу вытянутой формы, так как она может проскользнуть в слуховой канал. Поместите чистую, сухую берушу перед отверстием слухового канала и аккуратно надавите, пока она не зафиксируется на месте. При необходимости потяните ушную раковину, чтобы воздух вышел из слухового канала, и снова осторожно нажмите на затычку для ушей.



Правильно



Неправильно



После использования аккуратно удалите беруши, не дергая их, чтобы не повредить барабанную перепонку. Ослабьте беруши, приложив небольшое давление сзади ушной раковины, и раскатайте их одним куском кончиком пальца. Не используйте инструменты для удаления беруш (например, ватные палочки или пинцет). Это может повредить беруши или толкнуть их слишком глубоко внутри слухового канала.